



EGREGIO COLLEGA

L'Istituto Diagnostico Varelli si avvale, ormai da tempo, di sofisticati sistemi di automazione tali per cui **è utile, da parte Sua, un utilizzo di adeguati sistemi di raccolta dei campioni biologici.**

Il tutto **per evitare** il più possibile qualunque **procedura di ri-etichettatura e/o travaso dei campioni** che possono essere fonte di errore.

PROVETTA EMOCROMO

1. La tipologia di provetta corretta da utilizzare è la **Vacutainer 13x75 mm.**
2. Non utilizzare **MAI** provette con tappi con sistema a vite o provette di altre dimensioni.

PROVETTA SIERO

1. La tipologia di **provetta corretta da utilizzare è la provetta Vacutainer con gel separatore 13x75 mm (siero basse)** oppure 13x100 mm (siero alte) già centrifugate.
NON UTILIZZARE MAI PROVETTE CON TAPPI CON SISTEMA A VITE O PROVETTE DI ALTRE DIMENSIONI.
2. Non sono invece adatte le provette 16x100 mm (siero grandi) che ci costringono a travasare e ri-etichettare il campione.

PROVETTA SIERO/PLASMA SECONDARIA

1. La tipologia di **provetta corretta da utilizzare è la provetta vuota di dimensioni 13x75 mm**
2. Qualunque altro tipo di provetta ci costringe a travasare il campione
3. I **tappi idonei sono quelli di dimensione 13x15 mm**

ETICHETTE DA APPORRE SULLE PROVETTE

1. Chiediamo di verificare che l'etichetta si apposta dritta, con il cognome rivolto dalla parte del tappo e di fare attenzione a non tagliare nomi, né codici a barre.
2. Laddove riscontra macchie, puntini e segni vari sui codici a barre e/o etichette sbiadite, Le chiediamo di contattare subito il suo referente o la segreteria service, per correggere l'errore.

Reperibilità del materiale

Se non dispone del materiale su indicato, **può farne richiesta alla segreteria service inviando una mail a ordini@istitutovarelli.it**

Per ulteriori procedure da seguire, Le consigliamo di consultare la pagina del sito Istituto Diagnostico Varelli [Utility Room - Area dedicata ai service - Sezione Procedure Preanalitiche.](#)

Certi di una Sua gentile collaborazione, porgiamo cordiali saluti

Lo staff Varelli